

Einlegen der Einmalbiopsiekannüle full sCore

(REF.: DNG-2020)



In das wiederverwendbare automatische Biopsieinstrument Möller Medical Blue

(REF.: RGB-1000-10-1000)

Einmalbiopsiekannüle Möller Medical full-sCore DNG-2020



Wiederverwendbares automatisches Biopsieinstrument Möller Medical Blue RGB-1000-10-1000



Step 1: Öffnen des Gerätes

Die Möller Medical Blue in die rechte Hand nehmen (Abb. 1) und den Deckel von links nach rechts öffnen (Abb. 2).



Abb. 1

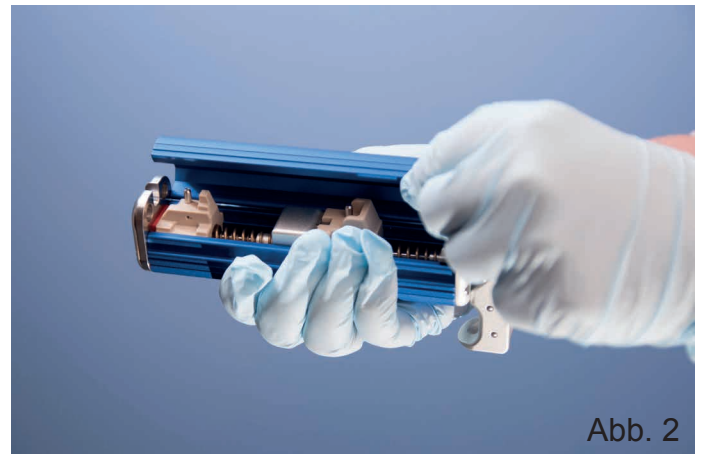


Abb. 2

Step 2: Einlegen der full-sCore

Bitte sicherstellen, dass der Kunststoffansatz der full-sCore sorgfältig auf den vorderen Arretierungsstift gesteckt wird. Der hintere Bereich liegt passgenau auf dem Mittelblock auf (silberner Block, Abb. 3-4).



Abb. 3

Vorderer Arretierungsstift



Abb. 4

Abstandshalter

Mittelblock

Step 3: Schließen des Deckels und Entfernen des Abstandshalters

Während des Schließens des Deckels Abstandshalter abziehen (Abb. 5). Der Deckel muss einrasten. Danach Entfernen der Schutzhülle der full-sCore (Abb. 6).




Step 4: Gerät in Schussbereitschaft bringen

Den Spannhebel zweimal betätigen um das Gerät in Schussbereitschaft zu bringen. (Daumen auf Spannhebel, Abb. 7).



Step 4: Entsichern und Auslösen des Schusses

Sicherungsstift von links nach rechts auf Position „UNLOCKED“ schieben (siehe Deckel der Blue, Abb. 8). Auslösen des Schusses am vorderen oder hinteren Auslöseknopf (Abb. 8-9).

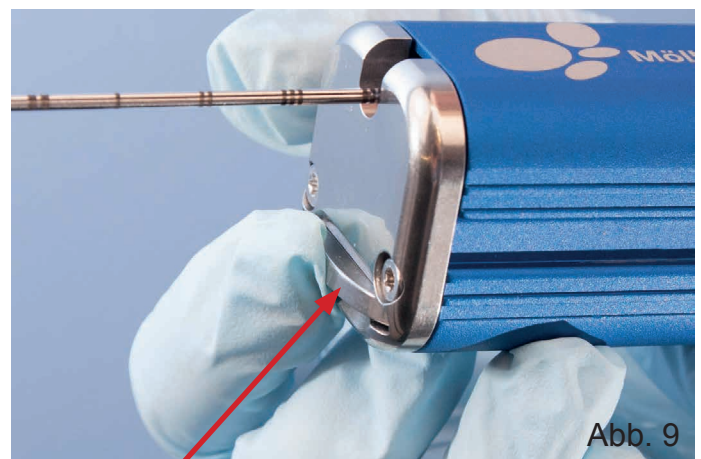

Sicherungsstift

Hinterer Auslöseknopf

Vorderer Auslöseknopf